

# Easypen®

Dispositif médical réutilisable

Stylo auto-injecteur

## Easypen® STYLO AUTO-INJECTEUR

(se reporter également au mode d'emploi présent dans les boîtes d'Edex® 10µg/ml et d'Edex® 20µg/ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment).

Easypen® est un dispositif médical réutilisable destiné à être utilisé avec les seringues d'Edex® 10µg/ml et d'Edex® 20µg/ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment.

**Pour l'administration intracaverneuse du médicament, il est recommandé que le patient reçoive une formation adéquate du médecin traitant.**

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce stylo auto-injecteur. Elle contient des informations importantes sur son utilisation.

Si vous avez d'autres questions, ou si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin.


Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Avant de commencer toute manipulation, il est important de bien se laver les mains et la zone d'injection avec de l'eau et du savon.

Disposer les éléments contenus dans la boîte sur une surface propre et dégagée. S'assurer que votre stylo auto-injecteur Easypen® est en parfait état.

Pour chaque injection, vous aurez besoin :

- de votre seringue d'Edex® (10µg/ml et 20µg/ml) préalablement préparée à la dose prescrite par votre médecin et selon les instructions de la notice du médicament.
- de votre stylo auto-injecteur Easypen®.
- d'un tampon imbibé de liquide désinfectant.

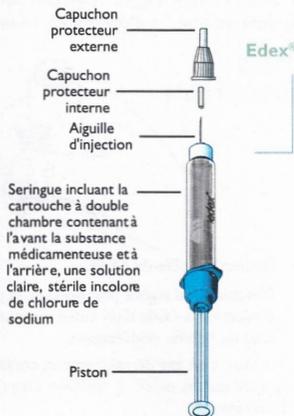

**Remarque :** les seringues d'Edex® doivent être utilisées exclusivement avec les aiguilles d'injection (B-D Micro Fine 0,33X12,7 mm) fournies.

## RAPPEL DE LA PRÉPARATION D'EDEX®


Préparation de la seringue

1




- Retirer l'opercule protecteur de l'aiguille d'injection.

2

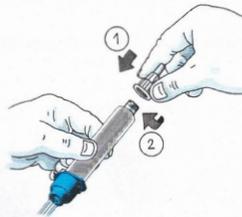

- Prendre la seringue et nettoyer l'extrémité supérieure avec un tampon imbibé de liquide désinfectant.
- Visser l'aiguille sur la seringue dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué sur le schéma jusqu'à ce qu'elle soit serrée.


3

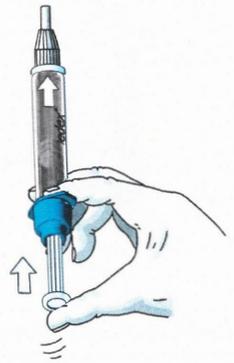

- Tenir la seringue en position verticale, aiguille d'injection vers le haut.
- Pousser doucement sur le piston de façon à faire passer totalement le liquide dans la partie avant de la cartouche pour dissoudre la poudre.

La poudre se dissout immédiatement au contact du liquide. Remuer doucement le système pour dissoudre la poudre plus rapidement. Cette solution est dans un premier temps opaque et devient très rapidement limpide.

4

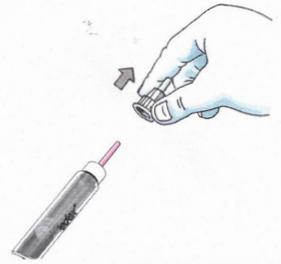


- Garder en main la seringue, aiguille vers le haut.
- Retirer le capuchon protecteur externe.

5



- Chasser l'air en tapotant sur la seringue et en poussant lentement le piston jusqu'à ce que tout l'air soit sorti et qu'une première goutte de solution apparaisse.

6

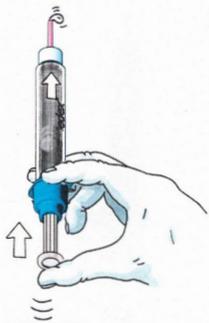

- Ajuster la dose à injecter prescrite par le médecin : pousser le piston jusqu'à ce que le haut du bouchon supérieur gris soit en face de la graduation souhaitée.

## PRÉPARATION D'EASYPEN®


1

- Vérifier que le cran de sécurité est verrouillé : le trait doit être en face du cadenas fermé.



- Pousser la partie inférieure de votre stylo auto-injecteur dans la partie supérieure comme indiqué sur la figure 1 jusqu'à entendre le clic d'enclenchement.
- s'assurer que la fenêtre de visualisation de l'injecteur chargé est blanche

2

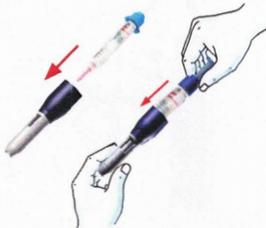


- Introduire votre seringue préalablement préparée à la dose prescrite dans la partie inférieure du stylo auto-injecteur sans retirer le capuchon rose de protection.

3




- S'assurer que les ailettes bleues de la seringue soient entrées dans l'espace prévu à cet effet en tournant légèrement.

4

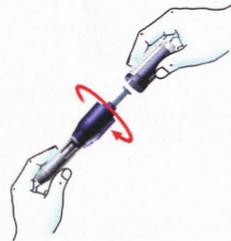

- Revisser la partie supérieure du stylo auto-injecteur.

5

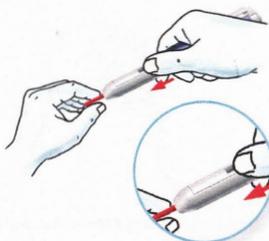

- Faire apparaître le capuchon rose de protection en poussant la seringue avec votre pouce par la fenêtre de contrôle.
- Retirer le capuchon rose de protection.

6



- Déverrouiller le cran de sécurité en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à ce que le trait soit en face du cadenas ouvert.

## INJECTION

1




- Nettoyer la zone d'injection du pénis avec un tampon imbibé de liquide désinfectant.

2



- Tendre légèrement le pénis et attendre le séchage de la zone en maintenant le pénis tendu.
- Remarque :** la zone d'injection doit être dans la surface montrée sur la figure.

3

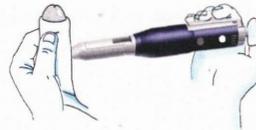

- Placer perpendiculairement le stylo auto-injecteur au niveau du pénis comme cela est indiqué sur la figure 3 en orientant la fenêtre de visualisation vers vous.
- Appuyer avec votre pouce sur le bouton d'injection et maintenir le stylo auto-injecteur en place jusqu'à ce que la fenêtre de visualisation de l'injection soit complètement colorée en blanc vous signalant que l'injection est terminée.

**Remarque :** Le temps d'injection varie d'un patient à l'autre. Le temps moyen d'injection pour une dose de 1 ml est d'environ 7 à 10 sec.

## APRES L'INJECTION



- Retirer l'aiguille du pénis.
- Effectuer une légère pression sur le point d'injection à l'aide d'un autre tampon imbibé de liquide désinfectant.

**Remarque :** en cas de saignement, continuer à appuyer sur le point d'injection jusqu'à ce qu'il s'arrête.



■ Verrouiller le cran de sécurité en tournant la molette pour que le trait soit en face du cadenas fermé.

- Dévisser les deux parties du dispositif.
- Retirer la seringue. Jeter la seringue.
- Remettre le capuchon blanc de protection de l'aiguille. Jeter l'aiguille.
- Ranger votre injecteur dans son étui.
- S'assurer que le dispositif est intact et fonctionne correctement avant chaque utilisation.

**Remarque :** une seringue et une aiguille ne peuvent être utilisées que pour une injection unique.

## ENTRETIEN et STOCKAGE

- L'Easypen® doit être traité avec précaution en évitant les situations susceptibles de l'endommager.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon en coton imbibé d'eau. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Pour nettoyer le dispositif, n'utilisez pas d'autres solutions telles que des produits chimiques, des désinfectants, des détergents ou des lingettes imbibées d'alcool.
- L'Easypen® doit être conservé à une température comprise entre 2°C et 40°C, si possible dans son étui, avec le piston déchargé et sans seringue à l'intérieur du dispositif.
- Les résidus secs du médicament peuvent également être éliminés à l'aide d'une brosse à dents douce.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation.
- Ne déchargez pas le dispositif sous vide sans seringue. Cela pourrait endommager le mécanisme d'accrochage du piston.
- Ne pas diriger le dispositif en direction d'une partie de votre corps autre que la zone d'injection, ni en direction d'une autre personne.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'injecteur.
- Tout accident grave survenu par rapport à l'appareil doit être signalé au fabricant et l'autorité compétente de l'État membre où est établi l'utilisateur et / ou du patient.

**DISTRIBUE PAR**  
Amdipharm Limited  
3 Burlington Road, Dublin 4, Ireland  
+33 (0)1 77 68 89 17

**FABRICANT**  
ANDROSYSTEMS SRL  
Via Carlo Muscetta, 224  
00139 Rome - ITALIE  
Tel: +39 06 25392811  
E-mail: clienti@androsystems.it